

## LIFECLEAN DESINFEKSJON

Ferdig blandet klordioksid løsning til desinfeksjon av flater og utstyr.  
BRUKERVEILEDNING

### Effektiv mot

Vegetative bakterier, virus, sopp, mykobakterier, f.eks. TB og endosporer, f.eks. *Clostridium difficile* og *Bacillus subtilis*.

### Klar til bruk

LifeClean er ferdig blandet og klar til bruk. Dette sikrer at blandingen alltid har riktig konsentrasjon og er enkel i bruk.

### Innhold

CIO <sub>2</sub>	Nominell 200 ppm
pH	Sur løsning
Tensider	<0,2 %

### Anbefalt fremgangsmåte ved desinfeksjon

Flater	
1	Fjern synlig forurensning og organisk materiale. Vask alltid først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier.
2	Påfør rikelig med LifeClean løsningen på ønsket flate. Virketid 2 minutter.
3	Tørk av eller skyll overflaten med rent vann etter desinfeksjon om det er usikkerhet om hvordan materialet reagerer med lav pH. Spesielt viktig på store stålflater.
4	Det anbefales regelmessig å tørke av/skylle flatene med rent vann.
5	Bruk beskyttelses hansker for å beskytte huden mot uttørring og mot smitterisiko. Ellers følg lokale anbefalinger og retningslinjer.
6	Lukk LifeClean flasken og merk med åpningsdato. En åpnet flaske er holdbar i 4 uker etter åpning.
7	Overskudds væske kan helles i avløp, legg flasken til resirkulering.

Utstyr	
1	Rengjør utstyret på forhånd. Fjern synlig forurensning og organisk materiale.
2	Legg utstyret i en beholder med LifeClean eller påfør direkte på utstyret med klut når det ikke tåler å dyppes i væske.
3	Virketid min 2 minutter og maks 5 minutter.
4	Skylles og tørkes. Utstyr som er i kontakt med slimhinner bør skylles med sterilt vann.
5	LifeClean som er overført til annen beholder er holdbar og har effekt opp til 3 timer i åpen beholder og opp til 8 timer i lukket beholder.
<b>Informasjon om håndtering, stabilitet og materialkompatibilitet, se sikkerhetsdatablad.</b>	

 PARTNERMED

www.partnermed.no

PartnerMed AS  
Tlf: 468 15 117

Mail: info@partnermed.no

### LifeClean Desinfeksjon

Desinfeksjon av overflater i henhold til gjeldene prosedyre. Full effekt på bakterier, virus og sopp innen 1 minutt. Ved sporer, f.eks. *Clostridium difficile* og *Bacillus subtilis* er virkningstiden 2 minutter. Det anbefales å tørke eller skylle av når lokale rutiner tilsier det og når det er usikkerhet rundt hvordan materialet reagerer på desinfeksjon. Vask først hvis det finnes rester av tidligere påførte kjemikalier på flaten da dette kan reagere med LifeClean.

### Påføring med spray eller pumpe dyse



**Alt 1.** Spray eller pumpe dyse kan settes direkte på LifeClean flasken. Vipp av sprute tuten og skru på spray/pumpe dyse, holdbar i 4 uker.

**Alt 2.** Hell LifeClean over på en sprayflaske. Det anbefales en lystett flaske, holdbar i 8 dager

**Vi anbefaler å skylle spraytoppene med vann etter bruk, eventuelt daglig.**